

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Physical Activity Monitoring (GR)



CERTH

CENTRE FOR
RESEARCH & TECHNOLOGY
HELLAS



Εισαγωγή

Η εφαρμογή Guardian Angel παρακολουθεί τα ζωτικά στοιχεία και την δραστηριότητα του χρήστη, ώστε να ανιχνεύει κρίσιμες καταστάσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μέτρηση εκτός ωρίων, το σύστημα ειδοποιεί τον φροντιστή του χρήστη.

Οδηγίες φόρτισης Τάμπλετ

1


Συνδέω το ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ στο ΤΑΜΠΛΕΤ και στον ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Τοποθετώ στην πρίζα. Φορτίζω κάθε 2-3 ημέρες για 3 ώρες !!!



Οδηγίες φόρτισης βραχιόλι

1

Ξεκουμπώνω τον αισθητήρα

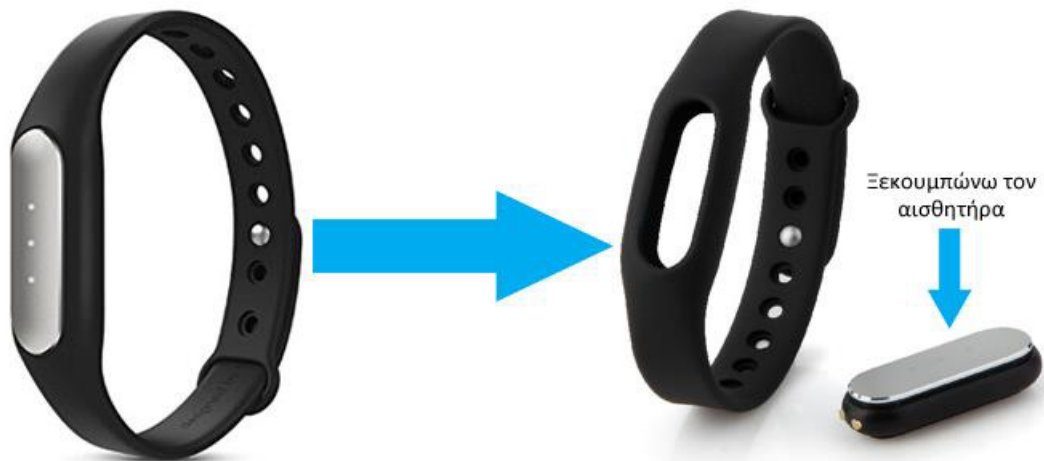


2

Εφαρμόζω τον αισθητήρα στο ειδικό καλώδιο



3

Συνδέω το ειδικό καλώδιο με τον ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ του ΤΑΜΠΛΕΤ

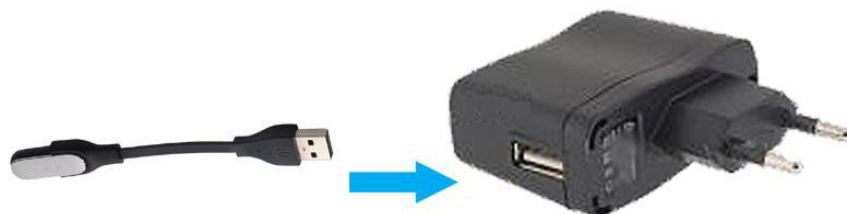

Τοποθετώ στην πρίζα.
Φορτίζω κάθε 2-3 ημέρες για 3 ώρες !!!

Για τεχνική υποστήριξη καλέστε στα 6972801970 & 2311257610 – Καθημερινές 11.00 – 14.00

Οδηγίες χρήσης πιεσόμετρου

1

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Lock, στο επάνω μέρος του πιεσόμετρου, δείχνει πράσινο χρώμα



2

Φορέστε το μανίκι, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα



3

Πατήστε το μεσαίο κουμπι με την παρακάτω ένδειξη



4

Το μανίκι θα γεμίσει αέρα και θα δείτε στην οθόνη τις τιμές της αρτηριακής πίεσης και των σφυγμών σας.

5

Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OK και πατήστε το κουμπί (του βήματος 3) για να σβήσει το πιεσόμετρο.

Αλλαγή μπαταριών πιεσόμετρου

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη της παρακάτω εικόνας, ανοίξτε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πιεσόμετρου και αλλάξτε μπαταρίες.



Οδηγίες χρήσης οξύμετρου

1

Φορέστε το οξύμετρο σε κάποιο δάχτυλο και πατήστε το πράσινο κουμπί.



2

Θα δείτε στην οθόνη την τιμή του οξυγόνου και των σφυγμών σας

3

Περιμένετε έως ότου σβήσει η οθόνη του οξύμετρου.

Αλλαγή μπαταρίας οξύμετρου.

Όταν η οθόνη εμφανίσει την ένδειξη της πρώτης εικόνας , ανοίξτε το καπάκι και αλλάξτε μπαταρία.

